


Fjärrmonitorering med Monidor: Snabbguide

Grundläggande användning




Starta mätaren genom att trycka på strömknappen.

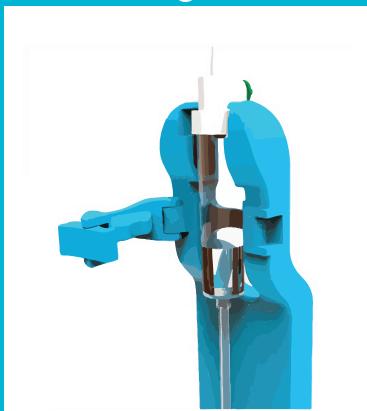

Anslut Monidrop-mätaren till droppkammaren.




Välj infusionshastighet med rullklämman eller flödesregulatorn.

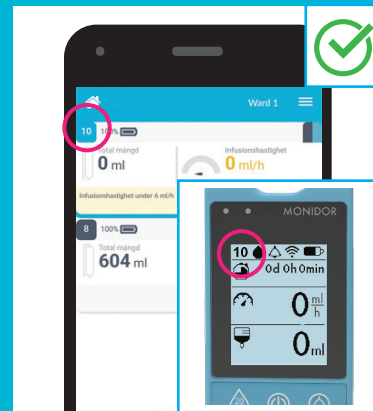


Använd enhetsnumren för att identifiera din Monidrop-mätare och IV Screen-kortet.

Avancerade inställningar och notifieringar

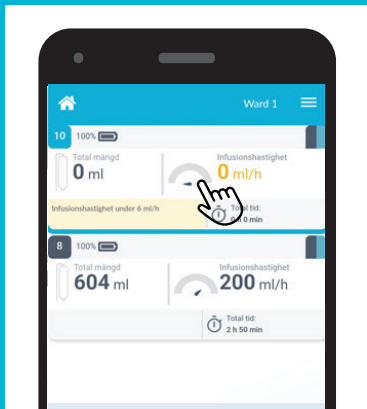


Om du vill kan du göra ytterligare inställningar genom att klicka på det enhetskort som du använder.

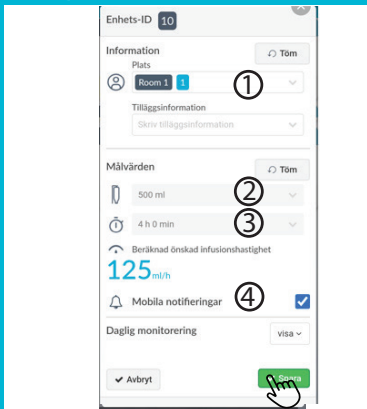

Ange patientplats (1), gränsvärden för vätskemängd (2) och behandlingstid (3). Ljudnotifieringar aktiveras automatiskt när inställningarna ställs in (4).



Om behandlingen fortgår som planerat visas kortet i IV Screen med en blå markering. Klockikonen indikerar att ljudnotifieringar är på.

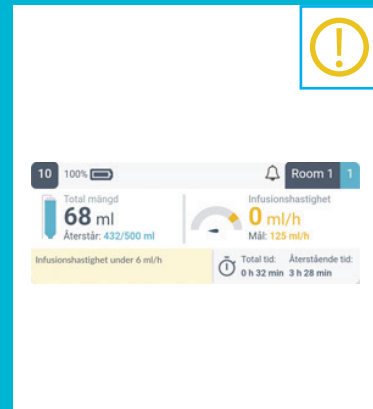

Infusionsavvikelser markeras med guld och orsaken till notifieringen visas i text.