

Laiteajokortti:

LAITTEEN KÄYTTÖTARKOITUS	<p>Käyttöaiheet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monidor-ratkaisu on tarkoitettu jaksottaiseen tai jatkuvaan parenteraalisten nesteiden annostelujen mittaamiseen ja seurantaan laskimonsisäistä annostetietä käyttäen. <p>Toimintaperiaate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monidor-ratkaisu on pilvipohjainen sovellusohjelmisto, jossa Monidrop infuusiomittari on yhdistetty IV Screen sovellukseen ja se lähettää sille infuusio- ja laitetiedot ja vastaanottaa infuusioon liittyviä viitearvoja. - IV Screen näyttää siihen kytkettyjen infuusiomittarien lähettämät tiedot verkkoselaimessa tai matkapuhelinsovelluksessa. IV Screeniin voidaan kytkeä ja siinä voidaan näyttää useita infuusiomonitoria kerrallaan. <p>Vasta-aiheet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lääkinnällisen koulutuksen saaneen henkilökunnan on päätettävä laitteen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen laitteen ominaisuuksien ja teknisten tietojen perusteella.
VÄLINEET JA TARVIKKEET	<p>Tarvittavat välineet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monidrop infuusiomittari, IV Screen etävalvontasovellus älypuhelimelle, tabletille tai työasemalle. - Monidrop infuusiomittari on varustettu uudelleen ladattavalla akulla. Sitä voidaan ladata joko säilytyksessä tai käytön aikana. Akun kesto on noin 2 vuorokautta. <p>Laitteen säilytys</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monidrop-laitteita tulee säilyttää niille soveltuvassa paikassa, kuten kansliassa tai lääkehuoneessa, jossa on mahdollista ladata useiden laitteiden akkuja yhtä aikaa.
LAITTEEN KÄYTÖN OSAAMISVAATIMUKSET	<p>Laitteen käytön aloitus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monidrop-infuusiomittarin kiinnittäminen tippakammioon, virran käynnistäminen ja infuusionopeuden säätö rullasulkijan avulla - IV Screen sovelluksen näkymän ymmärtäminen ja halutessaan potilaspaikan, nestemäärän ja hoidon keston asettaminen. <p>Laitteen käytön toteuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infuusion etenemisen seuranta hoidon aikana; sopiva infuusionopeus, hoidon kesto, tiputettu/jäljellä oleva nestemäärä <p>Laitteen käytön lopettaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Virran katkaisu Monidrop-laitteesta. Mahdollinen nestehoidon tietojen kirjaaminen IV Screen sovelluksesta.
ONGELMATILANTEET JA TOIMINTAHÄIRIÖT	<ul style="list-style-type: none"> - käyttäjä osaa tunnistaa laitteesta, käyttäjästä, potilaasta tai ympäristöstä johtuvat häiriöt ja toimia asianmukaisesti - <i>kenelle ja miten raportoidaan toimintahäiriöstä</i>
LAITTEEN HUOLTO	<ul style="list-style-type: none"> - <i>laitehuollon ymmärtäminen ja tarpeen määrittäminen</i> <ul style="list-style-type: none"> o missä huolletaan o kuka huomasi o mitä huomasi o milloin huomasi