

Monidrop[®]W-infusionsmonitor – Snabbguide

Monidrop-infusionsmonitor är avsedd att användas för att mäta mängden administrerade IV-vätskor vid infusionsbehandling. På monitorn visas infusionshastighet, total administrerad vätskemängd och behandlingstid.



Monidrop KAN INTE ANVÄNDAS FÖR ATT ÄNDRA infusionshastigheten. Använd ALLTID rullklämman för att ändra infusionshastigheten.
Öppna aldrig rullklämman helt.

1. Starta och använd Monidrop-enheten



a) Starta monitorn genom att trycka på strömknappen.


b) Anslut Monidrop till droppkammaren (se instruktionerna i avsnitt 2). Justera till önskad infusionshastighet med rullklämman.

Stäng av monitorn genom att hålla strömknappen nedtryckt i tre (3) sekunder. När monitorn stängs av raderas alla tidigare angivna data och inställningar.


Den valda infusionstiden och infusionshastigheten (ml/h) samt den administrerade vätskemängden under behandlingen (ml) visas på Monidrop.

2. Ansluta Monidrop till droppkammaren


a. Öppna låsbygeln som håller fast monitorn genom att trycka på spärren och dra upp bygeln.

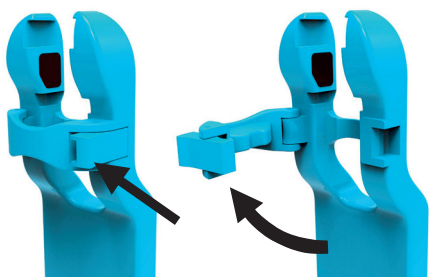

b. Placera droppkammaren i rätt läge. Observera att olika typer av droppkammare måste placeras på olika sätt.

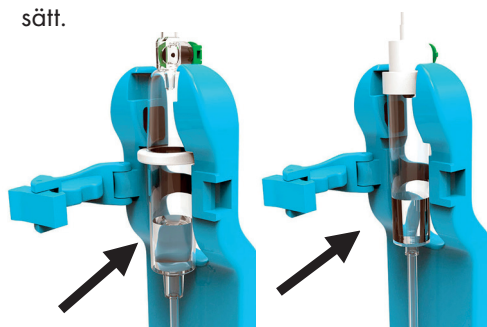

c. Tryck tillbaka låsbygeln till ursprungsläget så att den klickar på plats.

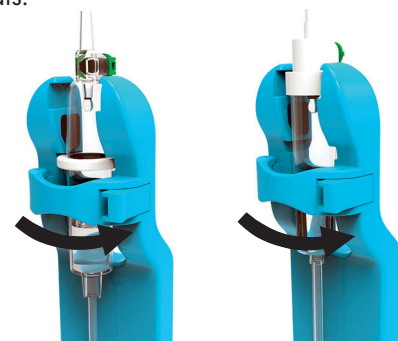

3. Justera infusionshastigheten och övervaka behandlingen

Justera infusionshastigheten med rullklämman på infusionssetet med rätt måtnoggrannhet. En grön LED-indikator och en droppikon på skärmen visar att IV-administrering pågår.




4. Hantera notifieringar med ljud

a. Notifieringsljud kan tystas och aktiveras med notifieringsknappen. Ljudavstängningsikonen visas högst upp på skärmen när infusionshastigheten mindre än 6 ml / h är avstängd. Notifieringar om infusionshastighet under 6 ml / h visas alltid utan ljud som standard när monitorn är på.

b. Om du trycker på knappen aktiveras ljudsignaler för notifieringar för infusionshastighet under 6 ml/h.

5. Skärmvisning

Under behandlingen visas infusionshastigheten och den totala infusionsvolymen på monitorskärmen. Funktionerna beskrivs nedan.

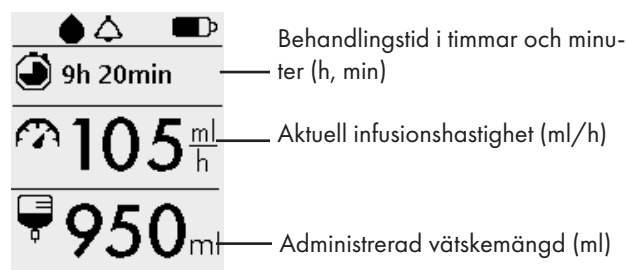

FI Lue lisätietoja laitteen käytöstä ja ominaisuuksista lataamalla Monidrop® W käyttöohje osoitteesta www.monidor.com

EN For additional information on the use and features of the device, the Monidrop® W user manual can be downloaded from www.monidor.com

SV Mer information om mätarens funktioner och hur den används, Monidrop® användarhandboken kan hämtas från www.monidor.com

DE Für weitere Informationen über die Verwendung und Funktionen des Geräts kann die Monidrop®-Bedienungsanleitung von www.monidor.com heruntergeladen werden

NL Download de handleiding van de Monidrop® voor meer informatie over het gebruik en de mogelijkheden van het apparaat. De handleiding vindt u op www.monidor.com

DA Yderligere oplysninger om brugen af enheden og dennes funktioner fremgår af brugervejledningen, der kan downloades fra www.monidor.com

FR Pour plus d'informations sur l'utilisation et les fonctionnalités de l'appareil, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de Monidrop® sur www.monidor.com

Viktiga säkerhetsanvisningar för laddaren:

Den här produkten är endast avsedd för inomhusbruk. När du använder en elektrisk apparat ska du alltid följa grundläggande säkerhetsanvisningar, till exempel följande: Läs alla instruktioner innan du ansluter strömförsörjningsenheter.

FARA - Minska risken för elchock genom att följa dessa instruktioner: En strömförsörjningsenhet ska aldrig lämnas utan tillsyn när den är ansluten. Koppla alltid ur strömförsörjningsenheten från eluttaget omedelbart efter användning.

WARNING - Minska risken för brännskador, brand, elchock eller personskador genom att följa dessa instruktioner:

1. Enheten får inte användas som leksak. Var alltid uppmärksam när strömförsörjningsenheten används av eller i närheten av barn.
2. Använd endast den här strömförsörjningsenheten för dess avsedda syfte, enligt den här guiden. Använd endast de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren i den här guiden.
3. Använd aldrig strömförsörjningsenheten om kabeln eller kontakten är skadad, om enheten inte fungerar som den ska, om den har tappats eller skadats eller hamnat i vatten. I sådana fall ska apparaten lämnas tillbaka till närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter för att undersökas, repareras eller justeras av elektriker eller tekniker.
4. Se till att inga föremål kommer/förs in i öppningarna.
5. Får inte användas utomhus.
6. Laddaren får inte användas i miljöer där aerosoler (sprayer) används eller där syrgas administreras.
7. Använd alltid ett eluttag som finns i närheten och är lätt att komma åt.
8. Dra inte i kabeln när enheten ska kopplas ur. Dra i kontakten, inte i kabeln, för att koppla ur enheten.
9. Enheter utan nivå V-klassificering för effekt får inte längre användas för elektronisk utrustning för hushålls- och kontorsbruk.
10. Kontaktinformation för tillverkaren: Sinpro Electornics Co.,Ltd. No.5, Yanxi St. P.E.P.Z. Pingtung City, Pingtung County 90093, Taiwan